

DER BESONDERE ZUGANG ZU IHREN PATIENTEN

NAHTLOS. SICHER. LANGLEBIG. EFFIZIENT.



FLOCARE® DirectPEG: PUNKT FÜR PUNKT BESONDERS.

NAHTLOS

Effektive Direktpunktion
ohne Fixationsnähte.
Für eine schnelle Anlage.

BESONDERS SICHER

Sonden-Indikator für eine
bessere Kontrolle der
korrekten Fixierung und
Komplikationsprophylaxe

BESONDERS LANGLEBIG

Zweilagiger Halteballon aus
Polyamid und Polyurethan für
zuverlässigen Halt im Stoma –
bis zu 6 Monate lang.*

BESONDERS EFFIZIENT

Ambulanter Wechsel
ohne erneute Endoskopie
für eine besonders
schonende und kosten-
effektive Behandlung.



*Die Lebensdauer ist abhängig von verschiedenen Faktoren und kann nicht vorhergesagt werden.
Zu den Einflussfaktoren gehören u.a. Medikamente, gastraler pH-Wert, Patientenmobilität und die Sondenpflege.

FLOCARE® DirectPEG: KURZANLEITUNG* FÜR DIE PLATZIERUNG.

1 Luftinsufflation des Magens und Bestimmung der Punktionsstelle (Diaphanoskopie) sowie Lokalanästhesie.

2 Stichinzision und senkrecht einbringen der Split-Kanüle mit innenliegendem Trokar unter leichtem Druck in den Magen.

3 Lösen der Arretierung des Trokars von der Split-Kanüle und Entfernung des Trokars. Luftdichtes Abdichten der Split-Kanüle ist nicht erforderlich.

4 Arretieren der Einführhilfe der Ballonsonde mit der Split-Kanüle.

5 Einführen der Ballonsonde durch die Split-Kanüle bis zur Einführmarkierung.

6 Die kleine weiße Ventilschutzkappe am Ballonfüllventil entfernen & verwerfen. Befüllen des Ballons (5 ml). Der Sondenindikator sollte sich am Ende des grünen bzw. am Anfang des blauen Bereiches befinden.

7 Spritze dekonnectieren → Indikatoranzeige bewegt sich etwa in den mittleren grünen Bereich.

8 Einführhilfe von der Split-Kanüle lösen und durch Auseinanderbrechen der Flügel entfernen.

9 Split-Kanüle aus dem Stoma ziehen und durch Auseinanderbrechen der Flügel entfernen.

10 Legen Sie eine Schlitzkomresse zwischen Stoma und externe Halteplatte.

11 Magen durch Zug an der Sonde an der Bauchdecke fixieren & durch Halteplatte sichern → Indikatorfeld sollte sich im blauen Bereich** befinden. Verschließen Sie das Ballonfüllventil mit der weißen Kappe, die am Ventil befestigt ist.

* Bitte die detaillierte Beschreibung in der Bedienungsanleitung beachten.

** Hinweis: Nach Ermessen des Arztes kann die Anzugskraft direkt nach der Sondenanlage so gewählt werden, dass die Anzeige im obersten grünen Bereich liegt.

UNSER ERNÄHRUNGSTEAM. DER HOMECARE-SERVICE VON NUTRICIA FÜR IHRE KLEINEN UND GROßEN PATIENTEN.

Wir entlasten Sie und Ihre Patienten als persönlicher Ansprechpartner für einen nahtlosen Übergang vom Behandlungszimmer in die medizinisch enterale Ernährung im Alltag.



- Unser Team von examinierten Gesundheits- und Krankenpflegern mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, auch im Umgang mit komplexen Fällen.
- Versorgungsmanagement deutschlandweit: Überall dort, wo Sie und Ihre Patienten uns brauchen.
- 100 % ernährungsmedizinisch erfahren, 100 % zuverlässig und 100 % engagiert.

Unser gemeinsames Ziel: ein optimaler Therapieverlauf für Ihre Patienten.

UNSERE SERVICES FÜR EINEN NAHTLOSEN ÜBERGANG VON DER KLINIK BIS IN DEN ALLTAG:

ORGANISATORISCHE UNTERSTÜTZUNG



Erstkontakt zu Patient in der Klinik



Umsetzung Entlassplan und Abstimmung mit dem Entlassmanagement



Rezeptabwicklung und Klärung Kostenübernahme mit der gesetzlichen Krankenkasse



Klärung Versorgung und Ernährungsplan mit weiterbehandelnden Ärzten



Dokumentation in elektronischer Fallakte



Kostenfreie Lieferung aller Produkte



24h Notfallhilfe für sondenernährte Patienten – telefonisch und vor Ort

MEDIZINISCHE UNTERSTÜTZUNG



Persönliche Einweisung in die Handhabung der Applikationstechnik



Ernährungs- und Applikationsplan



Digitale Unterstützung, z.B. Handlingsvideos oder Videochat



Telefonische Unterstützung für Trinknahrung



Hausbesuche mit pflegerischer Beratung



Kontrolle medizinischer Parameter z.B. Sondeneintrittsstelle, Gewichtsverlauf



TROKAR

ERGONOMISCH GEFORMTER TROKARGRIFF MIT ARRETIERUNG

für einen stabilen und komfortablen Halt während der Punktion

MIT INTEGRIERTEM LUFTVENTIL

kein Entweichen der insufflierten Luft nach Entfernen des Trokars für eine sichere Punktion



PATENTIERTE, KEGELFÖRMIGE SPITZE

ohne scharfe Kanten

ERNÄHRUNGSSONDE

DREHBARER ENFIT™-KONNEKTOR

für eine sichere enterale Ernährung

SCHLAUCHMATERIAL POLYURETHAN

PVC-frei, latexfrei und frei von BPA

SONDEN-INDIKATOR

zeigt Anzugskraft und Füllvolumen des Ballons zur Unterstützung bei Anlage und Nachsorge

LÄNGENMARKIERUNG ALLE 0,5 CM

zur präzisen Platzierung sowie zur Ermittlung der Austauschsonde ohne Einsatz eines Längenmessers

STABILER, REIFENFÖRMIGER, 2-LAGIGER BALLON

gute innere Abdichtung und zuverlässiger Halt bis zur vollständigen Ausheilung des Stomas. Sichere Liegedauer von bis zu 6 Monaten.* Buried Bumper-Risiko durch eine sichere Anzugskontrolle nahezu ausgeschlossen



3 WEISSE RÖNTGEN-KONTRASTSTREIFEN

für eine unkomplizierte Lagekontrolle

DIE FLOCARE® DirectPEG IST BESONDERS GEEIGNET:

- Wenn nur eine transnasale Gastroskopie möglich ist
- Bei Passageproblemen im Ösophagus
- Zur Vermeidung von Tumorzellenverschleppung v.a. bei Tumoren im HNO-Bereich
- Als Alternative zur Fadendurchzugsmethode bei Patienten, z. B. Kindern, bei denen ein späterer Austausch durch einen Button/Gastrotube geplant ist -> Wechsel ohne erneute Sedierung möglich

BESTELLINFORMATION: FLOCARE® DirectPEG HANDELSFORMEN

PZN	Art.-Nr.	SAP-Nr.	Bezeichnung	CH	Ansatz	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Länge in cm	VPE
16219060	656893	156893	Flocare® DirectPEG	12	ENFit™	3,0	4,2	37,6	2 St.
16219077	656707	156707	Flocare® DirectPEG	14	ENFit™	3,4	4,7	41,6	2 St.

UNSER GROSSES SORTIMENT AN FLOCARE® AUSTAUSCHSONDEN IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN UND LÄNGEN



Flocare® Minisoft Button



Flocare® Gastrotube



Flocare® Safety +
Gastrotube



Flocare® Safety +
Gastrotube Suction

Mit
Ablaufschkel
für die Magen-
dekompression



Informationen zu diesen Produkten und Bestellinformationen auf produkte.nutricia.de

Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main
Telefon 069 719 135 0
info.danone.de@danone.com

KUNDENSERVICE
00800 700 500 00 (gebührenfrei)
www.nutricia.de/med